

耳掛け式集音器NK-002 取扱説明書

このたびは、弊社の集音器をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 本製品は集音器です。医療機器の補聴器ではありません。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「使用上のご注意、保管方法」をお読みください。
- 取扱説明書は大切に保管し、必要なときにご利用ください。

製造販売会社 株式会社 日健

サポートセンター：support@nikens.co.jp

URL：www.nikens.co.jp

使用前に必ずご確認ください

- 破損、割れ、亀裂、不具合などがある場合は使用を中止し上記サポートセンターに修理をご依頼ください。そのままご使用を続けると感電・火災・ケガの原因になります。
- お客様自身による分解、改造、修理は絶対にしないでください。火災、ケガの原因になります。
- 必要以上に大きな音量で使用しないでください。耳を傷める原因になります。

使用中のご注意

- 1 イヤーピースのサイズが合わない場合は、付属のイヤーピースから合うサイズを選び交換してください。
- 2 コードを引っ掛けて本体の位置を調整しないでください。断線の原因になります。
- 3 充電台から外すときは、コードではなく必ず本体を持って外してください。
- 4 雑音が入る場合がありますので、なるべくマイク部に髪がかからないようにしてください。
- 5 使用しないときは必ず電源をOFFにしてから保管してください。
- 6 本商品をしばらく使わないときは、よく掃除してから冷暗所に保管してください。
- 7 防水ではありませんので水に濡らさないでください。

使用上のご注意（必ずお守りください）

お客様への危害、財産の損害を防止するため、以下のことを必ずお守りください。この製品は、お客様の聞こえを補助するための集音器です。他の目的に使用しないでください

誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


- 本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。故障の原因になります、保証の対象になりません。
- 医療機器の近く(手術室、集中治療室など)では使用しないでください。
- MRI(磁気共鳴画像診断装置)診断や電磁波を利用した装置を使用する治療を受けるときは、本製品を使用しないでください。
- 携帯電話および簡易携帯電話などと一緒には使用しないでください。ノイズが入ったり音が小さくなる原因になります。
- 本製品は、平らで乾燥した清潔な場所に保管してください。故障の原因になります。
- 激しい運動をするときは、本製品を使用しないでください。落とすと、破損する恐れがあります。歩行中でも周囲の状況にご注意ください。特に踏切や横断歩道などではご注意ください。
- 洗面所や道路などで、本製品をつけ外ししないでください。落とすと、破損する恐れがあります。

- 入浴や洗顔の際には本製品を使用しないでください。外した後は乾いた場所に保管し、ぬれた場所には置かないでください。
- 香水など、気化するものと一緒には使用しないでください。
- 充電は付属されている専用充電台を使用してください。
- 本製品は清潔に保ってください。

取り扱い上のお願（必ずお守りください）

- 耳漏の出る方は、治療してからお使いください。中耳炎などで耳漏の出ている方は、治療が終わるまで使用しないでください。耳漏によってイヤチップがつまり、音が悪くなったり、よく聞こえなくなったり、故障の原因となることがあります。
- 耳あなを清潔に保ってください。耳あかがたまっていると、装着時にイヤチップなどがつまり、音が聞こえなくなります。
- 取り扱いはいねいにしてください。落としたり強い衝撃を与えないでください。傷やひび割れが発生することがあります。
- 装着時、外耳道などに痛みが生じるときは使用しないでください。
- 就寝時、仮眠時は本集音器を外してください。
- 日焼け止めクリーム、整髪料、ヘアスプレー、化粧水などを本集音器に付着させないでください。
- 高温、水気、湿気を避けてください。
- 砂浜、砂場などの砂の上に直接置かないでください。
- 結露したときは、結露がとれるまで常温でよく乾かしてください。

各部の名称

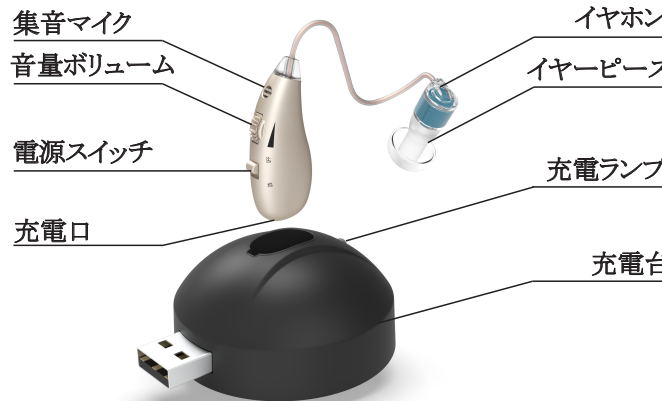

セット内容

- 集音器1個
- 充電用ケーブル
- イヤーピース(S、M、L)
- 集音器専用収納ケース
- 取扱説明書
- AC充電用アダプター
- 専用収納ケース
- 清掃ブラシ
- 充電台

ご使用方法



1 ご購入直後は、まず充電をしてください。反対方向に装着しないで下さい。充電できません。



2 充電開始：充電ランプ青色
充電完了：充電ランプ緑色
充電完了まで約5時間



3 イヤーピースと耳の穴にすき間ができないサイズを選んでしっかりつけ、奥まで入れてください。



4 装着時に多少ハウリング(ピー音)が発生することがありますが、正しく装着すればハウリングは消えます。

ご使用方法



5 音量ボリュームを最小の位置に合わせます。(ボリュームを上方に回す)



6 集音器を耳に装着します。音量ボリュームを回して、少しずつ音量を調節します。



7 集音器を耳から外すとき、イヤホンを持ってゆっくり取り出してください。

ご注意

- 保証期間内でも、次の場合には有料修理または有料交換となります。
- 付属品などの消耗品の交換。
 - 車輛船舶などに搭載されて生じた故障および損傷の場合。
 - 一般家庭用以外の用途(業務用など)で生じた故障および損傷の場合。
 - 取扱説明書に記載された内容を守られない場合の故障。
 - 本書がない場合および本書の字句を書き替えられた場合。
 - 使用上の誤り、または不当な修理、改造による故障および損傷の場合。
 - お引き渡し後の輸送・落下・水ぬれなどによる故障および損傷の場合。
 - 火災・公害・異常電圧および地震・落雷・風水害その他の天変地異による故障および損傷の場合。
 - 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障および損傷の場合。
 - 故障の原因が本商品以外にある場合。

初めてお使いになる方へ

集音器をつけてすぐには言葉の内容が聞き取りにくいものです。毎日、疲れない程度に、使い続けてください。以下のように4つの段階で、急がず徐々に使用時間を増やして、ゆっくりと慣れてください。

- 静かな場所で自分の声を聞いてみる。
- 静かな場所でご家族やお友達と話しをしてみる。
- テレビ(ニュース)を周りの人達と同じ音量で聞いてみる。
- 静かな場所で4～5人の人と話しをしてみる。

慣れるまでは疲れの原因にもなりますので、初めから音量を上げすぎないようにしてください。ご家族の皆様もご本人が集音器を使いこなせるようになるまで温かく応援してください。ご家族や周囲の方々の協力や心づかいが何よりの励みになります。良く聞こえない/ピーピー音が収まらない、装着時にピーピー音をするのが気になる場合

- イヤーピースが耳穴に正しく挿入されないとピーピー音(ハウリング)が発生する場合があります。その場合は集音器の位置や向きを調節してください。
- お客様の耳穴に合ったイヤーピースに交換してください。
- 個人差はありますが、集音器の装用を開始してから音に慣れるまで約1ヶ月かかります。

修理・交換規定

- 本製品は、ご購入日より1年間不具合や自然故障が発生した場合、無償にて修理・交換を行います。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 万一保証期間内に不具合や自然故障が発生した場合は、弊社のサポートセンターまでお問い合わせください。
- 本製品の故障に起因する付随的損害については責任を負いかねます。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

アフターサービス規定

本製品は、保証期間経過後の修理・交換につきましては、ご希望により有料で承ります。ただし、故障の内容、不具合の状態、製品・部品の在庫状況などにより有料修理もしくは有料交換をお受けできない場合もございます。有料修理・交換の内容につきましては、弊社のサポートセンターまでお問い合わせください。

お手入れ・保管方法

使用前後にイヤーピースを外して付属の清掃ブラシで清掃します。

- 1 耳あかなどのゴミで音口部が詰まらないように定期的に掃除してください。ゴミが詰まると音が聞こえにくくなる場合があります。
- 2 本体を拭くときは、乾燥した清潔な布を使用してください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めたものを含ませた後、かたく絞った布で拭いてください。
- 3 子どもや監督が必要な人の手の届かない、落下しにくい安全で乾燥した場所に保管してください。
- 4 次のような場所には保管しないでください。
 - 極端に高温、低温になる場所
 - 熱源器や火のそば
 - 野外や直射日光のあたる場所
 - お子様、ペットの手の届く場所
 - ほこりや湿気の多い場所
 - 有害物質の近く
 - 油煙や湯気のあたる場所
 - 滑りやすいものの近く
(グリース、雪、油、未乾燥の塗料など)

保証書

本製品は、ご購入日より1年間、不具合や自然故障が発生した場合、左記の修理・交換規定にしたがって無償にて修理・交換を行うことをお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の交換や修理など本製品の故障に起因する付随的損害については責任を負いかねます。ご了承ください。

※修理・交換を希望される場合、本書をお買い上げ証明(お買い上げ明細書・レシート・領収書など)の提示が必要となりますので、保証書とお買い上げ証明を大切に保管してください。

ご購入日: _____ 年 _____ 月 _____ 日
お客様ご氏名: _____ 様
お客様のご住所: 〒 _____

お客様連絡先(携帯): _____
お買い上げ店舗 _____