# 充電式デジタル集音器 きこえアシストPRO

取扱説明書 【保証書】



#### ご使用の前に

- ご使用前に必ず取扱説明書をよく読み、正しくお使い ください。お読みなった後は、取扱説明書を大切に 保管してください。
- この商品は集音器です。会話の声やテレビの音など 周囲の音を大きくする商品です。聴覚障害の方を 対象とした医療機器の補聴器ではありません。
- ・ご使用前に2時間ほど充電してください。
- ・集音器に慣れるまでは、1日の使用を1~2時間程度 からはじめてください。
- ・初めてご使用される際は、青いシール(絶縁シール) を必ず剥がしてからご使用して下さい。

#### 目次

・セット内容	•	•	•	•	1
•商品の概要	•	•	•	•	2
・充電方法(充電ケース)	•	•	•	•	3
•充電方法(集音器)	•	•	•	•	4
・お困りのとき Q&A	•	•	•	•	5-6
•商品仕様	•	•	•	•	7
・使用上・保管時の注意	•	•	•	•	8-9
<ul><li>安全にお使いいただくために</li></ul>	•	•	•	•	10-12
•保証規定	•	•	•	•	13-14
•保証書	•	•	•	•	15-17
・簡単使用マニュアル	•	•	•	•	18-21

#### セット内容



充電ケース

集音器本体2つ (R表記:右耳用·L表記:左耳用)



01


充電ケーブル(Type-C)

掃除用ブラシ

取扱説明書兼保証書

充電ケーブル用アダプターは入っておりません。

#### 本商品の概要

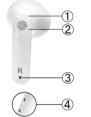

①表示ライト

- ・充電時、白色ライトが点灯

02

- •充電完了時、消灯
- ②タッチセンサー
- •音量調節(5段階)
- ③集音マイク
- 4)充雷口

### 充電ケース



⑤充雷表示ランプ

- ・充電ケーブル接続時点灯
- ⑥充電ケーブル差込口
- (Type-C)

## 充電方法(充電ケース)

03

・充電ケースに付属の充電ケーブル を差し込みます。

片方のケーブルをUSB ポートに差込み充電開始

\* 市販のUSBアダプターを 使用すると自宅のコンセント からも充電が可能。



- ・充電ケースは約2時間でフル充電
- \*点滅白光 ⇒ 充電中
- \*点灯白光 ⇒ フル充電完了
- ※フル充電した充電ケースは 集音器を3~4回の充電が 可能です。



07

## 充電方法(集音器)

04

08

- ・充電が完了した充電ケースに集音器をセットします。
- \*約2時間でフル充電します。





- \*ライト点灯 ⇒ 充電中 \*ライト消灯 ⇒ 充電完了
- ※可動時間は、使用時の音量に より8~11時間と変動する場合 があり。

#### お困りのとき Q&A

05

① 集音器の、音が小さい・音がしない

Q(質問)		A (答え)			
		音量を調整ください			
音が小さい	⇒	集音マイク部分を付属の掃除用 ブラシで掃除ください			
	⇒	充電ケースで充電してください			
音がしない	⇒	充電ケースが充電されているか 確認			

※ 解決できない時はサポートセンターまでご連絡ください

### お困りのとき Q&A

06

② 充電ケースが充電されない

# Q (質問)

充電されない

#### A (答え)

充電ケーブルが正しく 接続されているか、 破損していないか確認

充電元のUSBが 通電しているか確認

※ 解決できない時はサポートセンターまでご連絡ください

#### 商品仕様

商品仕様			
最大出力音レベル	<117dB SPL		
高周波数平均值	<111dB SPL		
最大サウンドゲイン	<40dB		
平均サウンドゲイン	28dB		
等価入力ノイズ	<23dB		
周波数範囲	F1≤250Hz、F2>5000Hz		
全高調波歪み	≤5%		
遅延時間	<15ms		
バッテリ-	リチウムバッテリ-		
動作電流	≤5mA		

### 使用上・保管時の注意

【道路交通規則について】

・自動車、自転車等の運転時にイヤホン等の使 用が違反となります。ただし、集音器や補聴器 を難聴対策として使用することは違反と

なりません。

万一、警察官から指摘をうけた場合は、 この商品が集音器である事を説明してください。

### 使用上・保管時の注意

09

- ・集音器や充電器のケースは清潔に保ってください。
- ・毎日乾いた布、またはティッシュで拭いてください。
- ・掃除用ブラシで定期的にゴミを除去してください。 (マイク部分の耳垢など)
- ・防水ではありませんので、水や湿気を避けてください。
- ・水、洗液、溶剤、油などを絶対に使用しないでください。
- ・掃除には付属品以外の道具を使わないてください。
- ・集音器に、強い衝撃を与えないようにしてください。
- ・保管する際は、涼しく乾燥した場所に保管してください。
- ・充電ケースや充電ケーブルは清潔で乾燥状態を 保ってください。
- ・使用しないときは、集音器を充電ケースに 入れ保管してください。
- ・直射日光や高温をさけてください。

11

- ・次のような症状がある場合は使用前に医師に 相談してください。
- ①耳を治療中、治療が必要な場合。
- ②耳の中に痛みがある場合。
- ③外傷や先天的な耳の変形がある場合。
- ④急激な難聴の進行が生じた場合。
- ⑤耳垢や異物の蓄積がある場合。
- ⑥耳だれがある場合。
- ⑦装着部の皮膚がかぶれる、湿疹などを起こした場合。
- ⑧めまい、吐き気、胸の痛みなどがある場合。
- ・使用前に必ず破損、割れ、亀裂、不具合などのチェックを 行い、異常があれば使用を中止すること(異常なまま 使用すると感電・火災・ケガの原因になります)。

### 安全にお使いいただくために

- ・音量を大きくしすぎないでください (耳を傷める原因になります)。
- 製品を水に濡らさないでください (水濡れが感電、故障、ケガの原因になります)。
- ・叩いたり、重いものをのせたりしないでください。
- ・お子様やペットが触れないように保管してください。
- 他人と貸し借りをしないでください。
- 就寝時には使用しないでください。
- ・異常(焦げ臭い・煙など)があれば、すぐ使用を中止して 電源を抜いてください。
- 本体や部品が壊れている場合は使用しないでください。
- ・差込口が曲がっている場合は使用しないでください。
- ・他社製のアクセサリー商品は保証対象外となります。
- ・別売りのアダプターは、AC100V 50/60Hzのコンセントを 使用ください。
- ・電源プラグは根元までしっかり差し込んでください。

### 安全にお使いいただくために

- お手入れをする場合は電源を抜いてくだい。
- ・電源プラグは定期的に乾いた布で拭いてください。
- ・使用しないときは電源を抜いて保管してください。
- ・電子レンジや高圧容器に入れないでください。
- ・電磁波による干渉にご注意ください。
- ・レントゲン撮影、CTスキャン等の画像診断機器は
- 本体に悪影響を及ぼします。これらの機器を用いた撮影を受ける前には本製品を外し、撮影室の外に
- 置いてください。また、MRIスキャンは強い磁力を 用いますので、MRI室に入る前には必ず外してください。
- ・本製品に使用しているバッテリーはリチウムイオン 電池です。他バッテリーと同じように、使い続けるほど
- 容量が減っていきます。十分に充電が出来なくなったら 買い替えをご検討ください。
- ・不要になった本製品は、各自治体指定の方法により処分をしてください。廃棄方法が不明の場合は自治体に相談し、 不燃ごみとして廃棄したり分解などはしないでください。

### 保証規定

- ・取扱説明書の注意に従ったご使用状態での故障の場合に のみ無償にて交換を行います。
- ・付属品は保証の対象とはなりません。
- ・不具合や故障が発生した場合には、サポートセンターまで お問合せください。
- ・保証期間は、ご購入日より1年間です。
- ・保証による無償交換は1回のみとなります。
- ・返品交換時の送料はお客様負担となります。
- ・本書は日本国内においてのみ有効です。
- ・本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ・保証による返却の際は、必ず保証書とお買い上げ時のレシートを同梱ください。
- ・レシートに購入日、商品名、販売店の記入がない場合には、 販売店に確認ください。
- ・必要事項の確認が取れない場合は、交換をお受けできませんので予めご了承ください。

## 保証規定

14

#### ご注意(保証対象外などについて)

- 付属品などの消耗品の交換。
- ・取扱説明書に記載された内容を守らなかった場合の故障。
- ・使用上の誤り、または不当な修理・改造による故障及び 損傷。
- ・故障の原因が本製品以外にある場合。
- ・火災、公害、異常電圧及び地震、落雷、風水害その他の 天変地異による故障及び損傷。
- ・本製品を紛失された場合。
- ・本保証書が無い、及び本保証書の字句が書き替えられた 場合。

### 保証書

15

商品名:きこえアシストPRO					
お買い上げ日		年	月	日	
お客様情報	氏名:				
電話番号					
住 所:					
販売店情報	店名:				
電話番号					
住 所:					

製造販売会社 株式会社日健

#### 保証書

16

12

お買い上げレシート 貼付け台紙

(貼り付けて折り曲げてください)

保証書と同梱して送付ください

製造販売会社 株式会社日健

住所:〒135-0064東京都江東区青海2-7-4 the SOHO 403 サポートセンター support@nikens.co.jp

製造販売会社 株式会社日健

URL: www.nikens.co.jp TEL: 03-5520-7520 FAX: 03-5520-7521

月曜~金曜日(土・日・祝日は除く) 受付時間(10:00~17:00)

#### 簡単使用マニュアル

18

① 集音器の電源 ON /OFF





ON: 充電ケースから取り出す OFF: 充電ケースにしまう

※電源は自動的にON/OFF

#### 簡単使用マニュアル

② 装着方法

しっかりと耳に入れてフィットさせます。





19

#### 簡単使用マニュアル

③ 音量調節

5段階の音量調節が可能です。 装着したまま、集音器の「◎」部分を 指先で軽くタッチして調整します。 タッチした際に下記の「お知らせ音」 がします。



20

音量レベル	お知らせ音	音量目安	
1	ピピピ ピピピ	最小	
2	Ľ	小	
3	Ľ	中	
4	Ľ	大	
5	ピー	最大	

※音量は5から1に戻り繰返します。 ※音量は左右別々に調整できます。

#### 簡単使用マニュアル

④ ハウリング(ピー音)について

集音マイク部分を手のひらで おおったり、物で強く押さえたり すると「ピー」と音が鳴る事が あります。

これは「ハウリング」といって 故障ではありません。 ご安心ください。



21

集音マイク部分

すぐに、手や物をマイク部分から外していただくと 鳴りやみます。

※「ハウリング防止」の為、集音マイク部分に触れない ようご注意ください。

13

17